


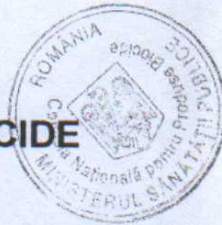

**MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE**



**MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 04.10.2010

**AVIZ
Nr. 1574BIO/02/05.14**

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 și cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și gospodării apelor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005, cu modificările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sesiunea din data 29.09.2010, a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

NOWA QUICK DES

Alte denumiri comerciale, după caz

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara)

Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH, Neualmerstrasse 13, 5400 Hallein, Austria.

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

S.C. Sanirom S.R.L., Com. Dragomirești Vale, Sat Dragomirești Deal, Autostrada București-Pitești km 13,5 Parc Industrial A1, Hala1, Romania.

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare)

A. Grupa principală:	1
B. Tipul/Tipurile de produs:	2

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumire chimică (IUPAC, ISO, sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1.	Propan-2-ol	200-661-7	67-63-0	70%
2.	N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine	219-145-8	2372-82-9	0,1%

VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:

Lichid gata de utilizare.

AVIZ Nr. 1574BIO/02/05.14**VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)**

Flacoane din material plastic de 0,75 litri.

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare:	Domeniul medical.
B. Aria de aplicare:	Dezinfectia suprafetelor.

IX. EFICACITATE

Activitate	Metoda de testare/ Protocol de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
bactericida si fungicida	DGHM (in conditii de curatenie - 0,03% albumina si de murdarie - 0,3% + 0,3% eritrocite ovine)	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Candida albicans</i>	concentrat	1 minut
inactiveaza virusul	DVV RKI	<i>Vaccinia virus</i>	concentrat	30 secunde
inactiveaza virusul	DVV RKI	FCV(surogat pentru norovirus)	concentrat	15 minute
inactiveaza virusul	DVV RKI	<i>Rotavirus</i>	concentrat	30 secunde
inactiveaza virusul	DVV RKI	BVDV(surogat pentru HCV)	concentrat	0,5 minute

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru / doza de aplicare	Timpul de acțiune
pulverizare	concentrat	1-5 minute
Pulverizare pentru inactivare FCV	concentrat	15 minute

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID**A. Produs biocid cu substanțe active - Substanțe**

Simboluri și indicarea pericolului	F - foarte inflamabil Xi - iritant
Fraze de risc (R)	R11 – foarte inflamabil R36 - iritant pentru ochii R67 – inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta și amețea
Fraze de prudență (S)	S2 - a nu se lăsa la îndemina copiilor S16 – a se păstra departe de orice flacăra sau sursa de scintei. Fumatul interzis S23 - a nu inspira aerosolii S35- a nu se arunca acest produs și ambalajul sau decât după ace sau luat toate precauțiile S45 – în caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (dacă este posibil și se va arăta eticheta) S51 – a se utiliza numai în locuri bine ventilate

AVIZ Nr. 1574BIO/02/05.14

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Profesionali.

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

Nu exista.

Avizul este valabil până la data: 13.05.2014
Avizul conține – 3 pagini

PREȘEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

